





24-timers blodtrykk - kort brukerveiledning

Fast oppsett for måleprotokoll kan bestemmes under INNSTILLINGER ⇒ KONFIGURASJON ⇒ BLODTRYKK.

Start Spirare

- Integrasjon med journalsystem: Velg pasient i journalsystemet og start Spirare fra menyvalg i journalsystemet.
- Ingen integrasjon: Logg på med brukernavn og passord. Søk frem pasient ved å angi f.eks. de første bokstavene i etternavnet og klikk på SØK [eller trykk ENTER]. Dobbelklikk [eller trykk ENTER] for å hente valgt pasient.
- Vinduet *Journal* vises med en oversikt over tidligere undersøkelser.


Ny undersøkelse

1. Kontroller at PC-kabelen er tilkoblet USB-port og at apparatet har nye batterier.
2. Koble 4-pins kabelen til apparatet. Finn de røde merkene, og sett «rødt mot rødt».
3. Slå på apparatet, og kontroller at "Co" vises i displayet.
4. Klikk på  på menylinjen.
5. Klikk på KLARGJØR OPPTAKER.
6. Velg NESTE for å laste ned protokollen til apparatet.
7. Trekk ringen på 4-pins kabelen mot deg for å frigjøre apparatet fra PC-kabelen.
8. Monter utstyret på pasienten.
9. Registrer et blodtrykk via apparatknappen . Protokollen for automatiske målinger vil igangsettes først når man har oppnådd en vellykket måling ved å trykke på startknappen.

Laste opp og se måleresultater

- Hjelp pasienten å ta av mansjetten og bærevesken.
- Følg punkt 1-4 på listen over.
- Klikk på HENT UT MÅLEDATA.
- Undersøkelsen legger seg øverst i listen i *Journal*.
- Dag - natt tider kan justeres i etterkant i fanekortet *Data*.
- Enkeltmålinger kan merkes som ugyldig i fanekortet *Data*.

Rapport / Utskrift

- Dobbel-klikk på ønsket undersøkelse i Spirare *journalen*.
- Velg PASIENT ⇒ UTSKRIFT eller klikk på  på menylinjen.

Avslutt Spirare

- Klikk på krysset øverst til høyre eller velg PASIENT ⇒ AVSLUTT for å avslutte programmet.