


# SPIRARE®

## ABPM - Kort Användarvägledning

### Start Spirare

- Integration med journalsystem: Välj patient i journalsystemet och starta Spirare från menyvalet i journalsystemet.
- Ingen integration: Logga på med användarnamn och lösenord. Sök fram patient med att ange t.ex. de första bokstäverna i efternamnet och klicka SÖK [eller tryck ENTER]. Dubbelklicka [eller tryck ENTER] för att hämta vald patient.
- Fönstret *Journal* visas med en översikt över tidigare undersökningar.


### Ny undersökning

1. Hämta patientens journal i Spirare
2. Anslut den avstängda blodtrycksmätaren till din dator.
3. Slå på mätaren och kontrollera att "Co" visas i displayen.
4. Klicka på symbolen för 24h blodtryck  på menyraden.
5. Klicka på FÖRBERED ENHET.
6. För inn patientens manschettstorlek och tid för dag/natt mätningar
7. Lägg märke til batteriets status längst ner i fönstret.
8. Tryck på NÄSTA . . . för at lasta ner protokollen til enheten .
9. Koppla blodtrycksmätaren från datorn och placera den på patienten.
10. Den första mätningen måste startas manuellt genom att trycka på startknappen (play) på mätaren.

### Föra över och se på mätresultat

- Frigör patienten från mätutrustningen.
- Följ punkt 1-4 på listan ovanför.
- Klicka på HÄMTA UT MÄTDATA.
- Vänta medan mätdata överförs til patientens journal i Spirare.

### Rapport / Utskrift

- Dobbel-klicka på önskad undersökning i Spirare *journalen*.
- Välj PATIENT ⇒ UTSKRIFT eller klicka på  på menylinjen..

### Avsluta Spirare

- Klicka på krysset upptill till höger eller välj PATIENT ⇒ AVSLUTA för att avsluta hela programmet.