

# SPIRARE®




## EKG - Kort Användarvägledning

Inställning för pappershastighet, amplitud, ändring av utskriftsrapporter etc. görs från menyraden under INSTÄLLNINGAR ⇒ KONFIGURATION ⇒ EKG.

### Starta Spirare

- Integration med journalsystem: Välj patient i journalsystemet och starta Spirare från menyvalet i journalsystemet.
- Utan Integration med journalsystem: Logga in med användarnamn och lösenord. Sök patient genom att t.ex. ange de första bokstäverna i efternamnet och klicka på SÖK [eller tryck ENTER]. Dubbelklicka [eller tryck ENTER] för att hämta vald patient.
- Fönstret *Journal* visas med en översikt över tidigare undersökningar.


### Ny EKG-mätning

- Fäst elektroderna på patienten.
- Kontrollera att EKG-enheten er inkopplad till datorn, och starta den med en liten tryckning mot symbolet  på touchpanelet. (SPE200 är på när batterisymbolen  lyser upp).
- Klicka på  på menylinjen för att starta Vila EKG. För att starta Rhythm ECG, använd menyen EKG ⇒ velg undersökning.
- Löpande EKG komplex visas på skärmen.
- Tryp på RECORD knappen för att lagra den EKG-mätning som visas på skärmen (sista 10 sekunder)
- Stäng bilden för att gå tillbaka till journalen.
- Undersökningen läggs överst i listan i *Journal*.

### Se på tidigare EKG-mätningar

- Enkel mätning: Dubbelklicka [eller använd PILTASTER och ENTER] på önskad undersökning i *Journalen*.
- Jämförelse av mätningar: Markera två eller tre tester i *Journalen* och klicka på mätningarna samtidigt som CTRL hålls ned. Tryck därefter på ENTER.

### Rapport / Utskrift

- Dobbelt-klicka på önskad undersökning i Spirare *journalen*.
- Välj PATIENT ⇒ UTSKRIFT eller klicka på  på menylinjen..

### Avsluta Spirare

- Klicka på krysset upptill till höger eller välj PATIENT ⇒ AVSLUTA för att avsluta hela programmet.