

SPIRARE®

Spirometri - Kort Användarvägledning

Start Spirare

- Integration med journalsystem: Välj patient i journalsystemet och starta Spirare från menyvalet i journalsystemet.
- Ingen integration: Logga på med användarnamn och lösenord. Sök fram patient med att ange t.ex. de första bokstäverna i efternamnet och klicka SÖK [eller tryck ENTER]. Dubbelklicka [eller tryck ENTER] för att hämta vald patient.
- Fönstret *Journal* visas med en översikt över tidigare undersökningar.

Ny undersökning

- Kontrollera att sensorn är inkopplad.
- Välj SPIROMETRI ⇒ STANDARD UNDERSÖKNING på menylinjen [eller tryck F2]. För andra typer av undersökningar, välj SPIROMETRI ⇒ VÄLJ UNDERSÖKNING.
- Fönstret *Spirometri* visas med streckade förväntade FV- och VT-kurvor.
- Sätt ett nytt munstycke i flödesgivaren och förbered patienten på testet.
- Klicka på START [eller tryck SPACE] och följ instruktionen på skärmen.
- När ”BLÅS NU” visas, kan utblåsning starta. Används *SPIRARE sensor*, kan inandning göras genom munstycket före utblåsningen startar.
- Klicka på NÄSTA MÄTNING [eller tryck SPACE] tills tillräckligt antal tester är utfört.
- Klicka AVSLUTA/LAGRA [eller tryck PIL NED och SPACE] för att lagra testresultaten.
- Undersökningen läggs överst i listan i *Journal*.


Se på tidigare undersökningar

- Enstaka undersökning: Dubbelklicka [eller använd PILKNAPPAR och ENTER] på önskad undersökning i *Journal*. Klicka på kolumnrubrikerna i fönstret *Spirometri* för att se andra parametrar.
- Jämförelse av undersökningar: Markera två eller tre tester i *Journal* med att klicka på testen samtidigt som CTRL hålls nere [eller välj med PILKNAPPAR och SPACE samtidigt som CTRL hålls nere]. Tryck därefter ENTER.

Trendkurvor

- Välj PATIENT ⇒ TRENDKURVER på menylinjen [eller tryck F3]. Ändringar i patientens testdata visas i en egen översikt.

Rapport / Utskrift

- Dobbelt-klicka på önskad undersökning i Spirare *journalen*.
- Välj PATIENT ⇒ UTSKRIFT eller klicka på  på menylinjen.

Avsluta Spirare

- Klicka på krysset upptill till höger eller välj PATIENT ⇒ AVSLUTA för att avsluta hela programmet.